



## Wiederverwendbare Mund- und Nasenmaske



- Bitte vor dem ersten Tragen waschen
- Elastisches Band zum Schnüren um den Kopf
- Eingearbeiteter Nasenbügel zur optimalen Anpassung an die Gesichtsform
- Funktionales 2-lagiges Gewebe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle mit hohem Tragekomfort  
Dieser lässt sich durch das Einkleben einer zu wechselnden (Slip-)Einlage noch weiter erhöhen
- Bei 60°C waschbar (bei 30/40°C empfehlen wir den Zusatz eines Wäschedesinfektionsmittels)
- Bitte die Maske in einem Wäschenetz oder einem Kopfkissenbezug waschen
- Nicht für den Trockner geeignet, **NICHT IN DER MIKROWELLE TROCKNEN / DESINFIZIEREN**
- Da es sich bei der FirstMask um ein persönliches Hygieneprodukt handelt, ist sie vom Umtausch ausgeschlossen
- Diese Maske ist kein zertifiziertes Medizinprodukt  
Sie begrenzt eine Tröpfchenübertragung und das unbewusste Berühren von Mund und Nase  
Das Tragen der Maske ersetzt nicht regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten
- Eine Durchfeuchtung kann durch das Einkleben einer (Slip-)Einlage verzögert werden

1) Die Maske über den Kopf ziehen.



2) Die Enden des Bandes über den Ohren entlangführen und hinter dem Kopf verknoten.



3) Die Seiten der Maske nach innen falten und den eingearbeiteten Drahtbügel an die Nase anlegen und der Gesichtsform anpassen.

